

NEO

Predictor®  
Early + Express

**ΕΛΕΓΕΤΕ** έως και  
**6 ημέρες νωρίτερα**  
& **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ** σε 1 λεπτό  
από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης  
το αποτέλεσμα από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου

**ΕΛΕΓΕΤΕ** έως και **6 ημέρες νωρίτερα** από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης χρησιμοποιώντας το Predictor® Early και **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ** το αποτέλεσμα από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας ή από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης και έπειτα σε **1 μόνο λεπτό** χρησιμοποιώντας το Predictor® Express. Προτού κάνετε τα τεστ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΤ;

Με το Predictor® Early μπορείτε να κάνετε το τεστ ελέγχου κύησης έως και **6 ημέρες νωρίτερα** από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης και με το Predictor® Express να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου ή από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης και έπειτα.



Αφού διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και όταν είστε έτοιμη να κάνετε το τεστ, βγάλτε το από την αλουμινένια συσκευασία και αφαιρέστε το ροζ κάλυμμα.



## I. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ PREDICTOR® EARLY ΕΛΕΓΕΤΕ ΩΣ ΚΑΙ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

### ΒΗΜΑ 1 ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

1. Διενέργεια του τεστ στη ροή των ούρων




Κρατώντας το τεστ κατά τρόπο ώστε το απορροφητικό άκρο να έχει κατεύθυνση προς τα κάτω, τοποθετήστε το στη ροή των ούρων για **5 μόνο δευτερόλεπτα**.

2. Η Συλλέξτε δείγμα των ούρων σας σε ένα καθαρό και στεγνό περιέκτη



Βυθίστε ολόκληρο το απορροφητικό άκρο στα ούρα για **5 μόνο δευτερόλεπτα**.

Καθ' όλη τη διάρκεια διενέργειας του τεστ μην κρατάτε ποτέ τη συσκευή κατά τρόπο ώστε το απορροφητικό άκρο να έχει κατεύθυνση προς τα επάνω.

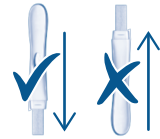

### ΒΗΜΑ 2 ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 3 ΛΕΠΤΑ

Τοποθετήστε το κάλυμμα στο τεστ και αφήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε η παράθυρο αποτελέσματος να είναι προς τα επάνω.



Περιμένετε **3 λεπτά** προτού διαβάσετε το αποτέλεσμα.

### ΒΗΜΑ 3 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



#### ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Στο παράθυρο αποτελέσματος εμφανίζονται δύο ροζ γραμμές. **Είναι πιθανό η μια γραμμή να είναι αρκετά πιο αχνή από την άλλη.** Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα είναι θετικό.



#### ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

Στο παράθυρο αποτελέσματος εμφανίζεται μια ροζ γραμμή.

## II. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ PREDICTOR® EXPRESS ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Χρησιμοποιείτε το τεστ κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω για το Predictor® Early.

**Σημείωση:** Κατά το βήμα 1, εφόσον συλλέξετε δείγμα ούρων, θα πρέπει να βυθίσετε το απορροφητικό άκρο στα ούρα για 20 δευτερόλεπτα. Κατά το βήμα 2, το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί σε **1 ΜΟΝΟ ΛΕΠΤΟ**.



Κρατήστε το τεστ στη ροή των ούρων για **5 δευτερόλεπτα**.



Συλλέξτε δείγμα ούρων και βυθίστε το απορροφητικό άκρο για **20 δευτερόλεπτα**.



Περιμένετε 1 λεπτό.



Είστε έγκυος



Δεν είστε έγκυος

**Σημείωση που αφορά και τα δύο τεστ:** Θα πρέπει πάντα να είναι ορατή τουλάχιστον μια γραμμή. Εάν δεν εμφανίζεται καθόλου γραμμή, σημαίνει ότι το τεστ δεν λειτουργεί σωστά και συνεπώς το αποτέλεσμα δεν είναι έγκυρο. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το απορροφητικό άκρο δεν εμποτίστηκε επαρκώς από ούρα. Επαναλάβετε το τεστ χρησιμοποιώντας μια νέα συσκευή και ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. **Τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται το συντομότερο δυνατό μετά το χρόνο αναμονής (3 λεπτά για το Predictor® Early και 1 μόνο λεπτό για το Predictor® Express).** Μην ερμηνεύετε το αποτέλεσμα μετά το πέρασ 10 λεπτών.



## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

### Πώς πρέπει να χρησιμοποιήσω το Predictor® Early + Express;

Το προϊόν Predictor® Early + Express περιλαμβάνει 2 τεστ εγκυμοσύνης: 1 Predictor® Early και 1 Predictor® Express

**ΕΛΞΕΤΕ** με το Predictor® Early έως και 6 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης

**ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ** το αποτέλεσμα σε 1 μόνο λεπτό χρησιμοποιώντας το Predictor® Express από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου ή από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης και έπειτα

### Πώς λειτουργεί το Predictor® Early + Express;

Και τα δύο τεστ που περιλαμβάνονται στη συσκευασία Predictor® Early + Express μετρούν την ποσότητα της ορμόνης της εγκυμοσύνης, η οποία ονομάζεται ανθρώπινη Χοριακή Γοναδοτροπική (hCG) και βρίσκεται στα ούρα των γυναικών που κυοφορούν. Η εν λόγω ορμόνη, η οποία παράγεται κατά την εγκυμοσύνη, εκκρίνεται από τον πλακούντα αμέσως μετά την εμφύτευση και αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό κατά τα πρώτα στάδια της κύησης.

### Πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω το Predictor® Early;

Χάρη στην υψηλή του ευαισθησία, το Predictor® Early μπορεί να ανιχνεύει την ορμόνη hCG έως και 6 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης. Ορισμένες έγκυες γυναίκες ενδέχεται να μην έχουν ανιχνεύσιμες ποσότητες της ορμόνης της εγκυμοσύνης στα ούρα τους κατά την ημέρα που χρησιμοποιούν το τεστ. Η ποσότητα της ορμόνης της εγκυμοσύνης αυξάνεται καθώς η εγκυμοσύνη εξελίσσεται. Σε κλινικές μελέτες, το 76% των εγκύων είχε επίπεδα hCG αρκετά υψηλά ώστε να ανιχνευθούν από το τεστ 6 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης (5 ημέρες πριν από την πρώτη ημέρα της αναμενόμενης περιόδου). Το Predictor® Early μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Η υπερβολική κατανάλωση υγρών πριν το τεστ μπορεί να προκαλέσει αραίωση της ορμόνης της εγκυμοσύνης, γι' αυτό καταναλώστε φυσιολογικές ποσότητες υγρών προτού κάνετε το τεστ. Εάν κάνετε το τεστ πρώιμα, συστήνεται η χρήση των πρώτων ούρων της ημέρας.

### Πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω το Predictor® Express;

Χρησιμοποιώντας το Predictor® Express μπορείτε να κάνετε το τεστ ελέγχου κύησης από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου ή από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης και έπειτα. Το Predictor® Express μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Η υπερβολική κατανάλωση υγρών πριν το τεστ μπορεί να προκαλέσει αραίωση της ορμόνης της εγκυμοσύνης, γι' αυτό καταναλώστε φυσιολογικές ποσότητες υγρών προτού κάνετε το τεστ.

### Πόσο ακριβή είναι τα τεστ;

Εργαστηριακές μελέτες έχουν υποδείξει ότι τόσο το Predictor® Early όσο και το Predictor® Express έχουν ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου.

### Πότε πρέπει να ερμηνεύω τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα των τεστ πρέπει να ερμηνεύονται το συντομότερο δυνατό μετά το χρόνο αναμονής (3 λεπτά για το Predictor® Early και 1 μόνο λεπτό για το Predictor® Express). Μην ερμηνεύετε τα αποτελέσματα των τεστ μετά το πέρασ 10 λεπτών.

### Τι πρέπει να κάνω εάν το αποτέλεσμα του Predictor® Early είναι θετικό (είμαι έγκυος);

Το θετικό αποτέλεσμα (εγκυμοσύνη) σημαίνει ότι ανιχνεύθηκε η ορμόνη της εγκυμοσύνης (hCG), η οποία, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλώνει την ύπαρξη εγκυμοσύνης. Προκειμένου να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε το τεστ Predictor® Express από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας. Εάν το αποτέλεσμα του Predictor® Express είναι και αυτό θετικό, θα πρέπει να επισκεφθείτε τον ιατρό σας, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι είστε έγκυος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, αλλά πιστεύετε ότι δεν είστε έγκυος, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

### Τι πρέπει να κάνω εάν το αποτέλεσμα του Predictor® Early είναι αρνητικό (δεν είμαι έγκυος);

Μπορεί να μην είστε έγκυος ή μπορεί τα επίπεδα της ορμόνης hCG να μην είναι αρκετά υψηλά ώστε να είναι ανιχνεύσιμα από το τεστ. Ενδέχεται επίσης να μην έχετε ολοκληρώσει σωστά την ημερομηνία που περιμένετε την περίοδό σας. Επαναλάβετε το τεστ χρησιμοποιώντας το Predictor® Express από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου. Εάν η περίοδος σας δεν έχει έρθει εντός μιας εβδομάδας, επαναλάβετε χρησιμοποιώντας ένα ακόμα τεστ Predictor® Express. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό και η περίοδος σας δεν έχει έρθει ακόμα, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

### Γιατί το Predictor® Early έδειξε θετικό αποτέλεσμα, ενώ το Predictor® Express αρνητικό;

Ακόμα και εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό όταν κάνετε το τεστ πρώιμης διάγνωσης, παραμένει η πιθανότητα να σας έρθει περίοδος και το Predictor® Express να δείξει αρνητικό αποτέλεσμα. Στο χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της ωορρηξίας και της πρώτης ημέρας καθυστέρησης της περιόδου, πολλές αλλαγές μπορούν να συμβούν στον οργανισμό σας. Κατά τις πρώτες εβδομάδες μετά τη σύλληψη, υπάρχει σημαντικά υψηλός κίνδυνος πρόωμου τερματισμού της κύησης. Το αρχικό τεστ εγκυμοσύνης πρώιμης διάγνωσης μπορεί να είναι θετικό, ενώ η επανάλυσή του μερικές ημέρες αργότερα ενδέχεται να δώσει αρνητικό αποτέλεσμα. Το Predictor® Early δείχνει θετικό αποτέλεσμα κατά τη στιγμή του πρώιμου ελέγχου επειδή υπάρχει στον οργανισμό σας η ορμόνη της εγκυμοσύνης. Συστήνεται επομένως η επιβεβαίωση του αποτελέσματος με τη χρήση του τεστ Predictor® Express από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας.

### Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, μπορώ να κρατήσω το τεστ σαν ενθύμιο;

Η θετική ένδειξη δεν μεταλλάσσεται και εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να φυλάξετε το τεστ με το θετικό αποτέλεσμα για να το δείξετε στους αγαπημένους σας ή ακόμα για να το τοποθετήσετε στο πρώτο άλμπουμ του μωρού σας.

### Μπορεί το αποτέλεσμα να επηρεαστεί από τη λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων;

Μόνο τα φαρμακευτικά σκευάσματα που περιέχουν ανθρώπινη Χοριακή Γοναδοτροπική (hCG), δηλαδή την ορμόνη της εγκυμοσύνης, δύνανται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Άλλα φάρμακα γονιμοτήτας (όπως το Clomid), τα αντιβιοτικά, το αλκοόλ, τα αναλγητικά ή το αντιουλθητικό χάπι δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

### Έχετε άλλες ερωτήσεις;

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση [www.predictor.eu/gr](http://www.predictor.eu/gr)

Predictor®

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ PREDICTOR®

Το Predictor®, το οποίο κυκλοφόρησε στο εμπόριο το 1971, ανεδείχθη ως το πρώτο τεστ εγκυμοσύνης οικιακής χρήσης παγκοσμίως. Αποτελεί ένα αξιόπιστο συνεργάτη προαφέροντας οικονομικά προσιτές και έμπιστες λύσεις που συντελούν στην επίτευξη της απόκτησης ενός υγιούς παιδιού με φυσικό τρόπο.

### Η ΣΕΙΡΑ PREDICTOR® ΑΝΤΑΓΕΙΛΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

**Predictor® Express:** Το Predictor® Express, όντας πολύ γρήγορο στη λειτουργία, σας παρέχει τη δυνατότητα να μάθετε εάν είστε έγκυος ή όχι σε 1 μόνο λεπτό από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας.

**Predictor® Early:** Χάρη στην υψηλή του ευαισθησία, το Predictor® Early σας παρέχει τη δυνατότητα να μάθετε εάν είστε έγκυος ή όχι έως και 6 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης.

**Predictor® Early Digital:** Σας δίνει τη δυνατότητα να μάθετε εάν είστε έγκυος ή όχι, παρέχοντας το αποτέλεσμα με ένα αλάνθαστο YES+/-NO-. Όντας ιδιαίτερα ευαίσθητο, το Predictor® Early Digital μπορεί να ανιχνεύσει την ορμόνη της εγκυμοσύνης έως και 5 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης.

**Predictor® Early + Express:** Η συσκευασία περιέχει 1 Predictor® Early για να ελέγξετε την πιθανότητα εγκυμοσύνης έως και 6 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης + 1 Predictor® Express για να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα σε 1 μόνο λεπτό από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου.

**Predictor® Ovulation test:** Βοηθά στη μεγιστοποίηση της πιθανότητας επίτευξης κύησης με φυσικό τρόπο, υποδεικνύοντας τις 2 πιο γόνιμες ημέρες του κύκλου σας.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά το πέρασ της ημερομηνίας λήξεως που αναγράφεται στη βάση της συσκευασίας. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος. Θερμοκρασία φύλαξης: 4-30°C. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται στην κατάψυξη, ούτε να φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 30°C. Μόνο για διαγνωστική χρήση in-vitro. Δεν επιτρέπεται η εσωτερική χρήση. Το παρόν τεστ είναι μιας χρήσεως. Τα χρησιμοποιημένα τεστ πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο απορριμμάτων και όχι εντός της κλεψάνης της τουαλέτας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία είναι ανοιγμένη ή κατεστραμμένη.

Church & Dwight Co., Inc., Ewing, NJ 08628, USA, E.U. representative: Church & Dwight UK Ltd., Folkestone, Kent, England.

Διανέμεται από την: OMEGA PHARMA HELLAS AE, 19ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, τκ 146 71 N. Ε.θρ.αίτια.

Distrib. 2108188900 [www.omega-pharma.gr](http://www.omega-pharma.gr) email: [contact@omega-pharma.gr](mailto:contact@omega-pharma.gr) Διανέμεται στην Κύπρο από:

Thrillnet in Cyprus by: C.A. Papaellinas Ltd Tel: 0035722741741



30°C

CE 0086



OMEGA PHARMA